

Orvosi eszköz használati útmutatója



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Őrítze meg, mert fontos információkat tartalmaz, amelyeket az orvosi eszköz alkalmazásakor szem előtt kell tartani. A benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. További kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.

1. Milyen típusú készítmény az Enterosgel®, és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Az Enterosgel® IIa. osztályú orvosi eszköz. Az innovatív Enterosgel® enteroszorbens megköti a toxinokat (méreganyagok), a káros anyagokat, a kórokozókat és az allergéneket a gyomor-bél traktusban, és eliminálja azokat a szervezetből. Az Enterosgel® a hasmenéses megbetegedések kiegészítő kezelésére szolgál.

Az Enterosgel® terméket a gyermekek és felnőttek az alábbi megbetegedések esetén használhatják:

- felnőttek és gyermekek akut gasztroenteritisze (hasmenése)
- felnőttek és gyermekek hasmenéses tünetekkel járó allergiás megbetegedései
- irritábilis bél szindróma (D-IBS) miatti hasmenés


Ajánlott adagolás

Felnőttek és 15 év feletti gyermekek: 15–22,5 g naponta 3-szor (15 g = 1 evőkanál)

Gyermekek 7 és 14 éves kor között: 10 g naponta 3-szor (10 g = 2 teáskanál)

Gyermekek 1 és 6 éves kor között: 5 g naponta 3-szor (5 g = 1 teáskanál)

A készítményt megfelelő mennyiségű folyadékkal kell bevenni (felnőttek és 7 éves kor feletti gyermekek: 200 ml; 1 és 6 éves kor közötti gyermekek: 50–100 ml).

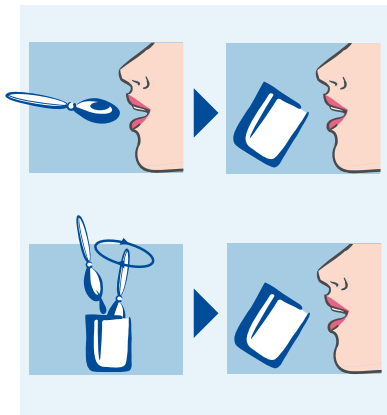

Fontos továbbá az elégséges folyadékbevitel, amely ugyancsak hozzátartozik a hasmenés alapvető kezeléséhez.

A készítményt étkezés vagy gyógyszer alkalmazása előtt vagy után 1–2 órával kell bevenni.

Figyelmeztetés

Az Enterosgel® befolyásolhatja bizonyos szájon át alkalmazott gyógyszerek felszívódását, ezért 1–2 órával a gyógyszerek alkalmazása előtt vagy után vegye be.

Ha gyógyszert szed, akkor orvosát vagy gyógyszerészét is megkérdezheti az Enterosgel® alkalmazásával kapcsolatban.

Ellenjavallatok

Bélrengyeség, bélelzáródás, a készítménnyel szembeni intolerancia (a korábbi alkalmazás alapján).

Terhesség és szoptatás

Az Enterosgel® alkalmazható terhesség és szoptatás alatt.

Lehetséges mellékhatások

Émelygés (hányinger), hányás, székrekedés.

2. További információ

Összetétel:

polimetilsziloxán-polihidrárt 70%, tisztított víz 30%.

Az Enterosgel® nem tartalmaz cukrot, édesítőszert, laktózt, glutént, zsírt, színezéket, aromát és tartósítószert.

Kiszérelés:

orális szuszpenzió, 90 g-os tubus, 225 g-os tubus, 15 g-os tasak (10 tasak egy csomagban).

Megjegyzés:

Alkalmazás előtt jól rázza fel a tubust.

Az Enterosgel® kinyomása után a tubusból vagy a tasakból bizonyos mennyiségű folyadék távozhat.

Tárolás:

4 és 25 °C között tárolandó. Nem fagyasztható. Gyermekektől elzárva tartandó! Felbontás után óvja a kiszáradástól. A tubus kinyitása után 30 napon belül használja fel a készítményt.

Felhasználható:

A csomagoláson jelzett időpontig.

Mi a teendő, ha a csomagolás sérült:

Ne alkalmazza a készítményt, ha a csomagolás sérült.



Gyártó:



Bioline Products s.r.o., Krakovská 1338/10,
110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság
tel./fax: + 420 266 317 783
e-mail: info@enterosgel.eu
www.enterosgel.eu

Legutóbbi változtatás dátuma: 2016.
február 10.

A csomagoláson feltüntetett szimbólumok magyarázata:



Minőségmegőrzési idő



Tételszám (gyártási tétel megjelölése)



Gyártó



Kérjük, olvassa el a használati útmutatót



Hőmérséklet-tartomány meghatározása



Tanúsított orvosi eszköz



Eldobható csomagolás. A használt csomagolást helyezze egy megfelelő hulladékgyűjtő tartályba.



Újrahasznosítható csomagolóanyagok



A csomagolásért lett fizetve a megfelelő illeték a nemzeti csomagoláskézelő rendszerbe.

Hasznos információk az Enterogel® hatásmechanizmusát illetően

A gyomor-bél traktus fontos szerepet játszik a jó egészség fenntartásában:

- a szervezet számára szükséges tápanyagokat szállít;
- káros anyagoktól és toxinoktól szabadítja meg a szervezetet;
- immunfunkciót lát el, akadályt képez.

Betegségek és tünetek okai

A fertőző betegségek kórokozói, a toxinok, az allergének és a xenobiotikumok (peszticidok, radionuklidok, nehézfémek sói stb.) intenzív bejutása a gyomor-bél traktusba gyomor- és bélfertőzésekhez, mérgezésekhez és allergiás reakciókhoz vezet. A szervezet működése során káros és toxikus anyagcseretermékek termelődnek. Egy részük a bélbe kerül, és általában távozik a szervezetből a széklettel, bizonyos káros anyagok azonban felszívódhatnak a vérkeringésbe, visszajuthatnak a májba, és az enterohepatikus (májon belüli) körforgásban maradhatnak. Az akut mérgezés leggyakoribb tünetei az általános rossz közérzet, a fejfájás, a hányinger, a hányás, a hasmenés, az allergiás tünetek és a megemelkedett testhőmérséklet. Az endogén vagy exogén toxinok kis koncentrációinak hosszú távú hatása a szervezet krónikus mérgezéséhez vezet, amelyet egyéb betegségek, például krónikus fáradtság szindróma vagy vérszegénység álcázhat.

Javasolt teendő = MÉREGTELENÍTÉS

Fontos lépés a felépüléshez, az optimális egészséghez és a hosszú élethez vezető úton a méregtelenítés, azaz a káros anyagok – toxinok és kórokozó mikroorganizmusok – eltávolítása a gyomor-bél traktusból.

Az Enterogel® hatóanyaga a polimetilsziloxán-polihidrát. Ez a pórusos szerkezetű szerves polimer-szilikonvegyület megkötí felületén a mérgeanyagokat, és eltávolítja azokat a szervezetből.

A méregtelenítés javítja az általános egészségi állapotot és az emésztést, erősíti a fertőzésekkel szembeni ellenálló képességet, és hozzájárul a szervezet optimális működéséhez.



ENTEROGEL

Orvosi eszköz  1023